

DELMAR HYPERTONIC je nosní sprej s mořskou solí. Obsah solí v roztoku je vyšší než uvnitř buněk lidského těla, koncentrace solí odpovídá slanosti mořské vody. Takové roztoky označujeme jako hypertonické. DELMAR HYPERTONIC po aplikaci na oteklé nosní sliznice přirozeným mechanismem osmózy odvádí vodu, čímž snižuje otok a usnadňuje dýchání nosem. DELMAR HYPERTONIC je určen k dlouhodobému užívání u osob s narušenou funkcí nosní sliznice, přináší úlevu při rýmě a pocitu ucpaného nosu, aniž by došlo k poškození nosní sliznice nebo ztrátě účinnosti.

### Kdy použít DELMAR

- při pocitu ucpaného nosu
- při akutním zánětu nosní sliznice
- při rýmě z nachlazení a rýmě alergického původu
- při zánětu vedlejších nosních dutin
- před použitím nosních kortikosteroidů
- pro zmírnění negativních účinků dlouhodobého užívání nosních kapek obsahujících vazokonstriktory
- při obtížích s chrápáním

### Jak používat DELMAR HYPERTONIC

Dospělí a děti od 2 let: Aplikujte jednu až dvě dávky do každé nosní dírky několikrát denně podle potřeby.

Před použitím vyjměte ochranný kroužek a sundejte průhledný ochranný kryt trysky. Sprej při aplikaci držte ve svislé poloze tryskou nahoru. Několikrát stlačte dávkovací mechanismus směrem dolů, dokud nedojde k vystříknutí roztoku. Trysku spreje jemně zasuňte do nosní dírky a stiskněte dávkovací mechanismus. Přitom stále držte sprej ve svislé poloze a nezaklánějte hlavu. Během vstříku lehce vdechněte nosem. Po použití omyjte trysku dostatečným množstvím vody a vraťte ochranný kryt a kroužek do původní

polohy. Z hygienických důvodů má každý uživatel mít svůj vlastní sprej.

### Další informace

U citlivých osob může dojít k alergické reakci, která je obvykle mírná a vymizí po přerušení používání. Nejsou k dispozici dostatečné údaje pro posouzení rizika použití DELMARU během těhotenství a kojení. Doba užívání není omezena.

**Složení:** čištěná voda, mořská sůl, benzalkonium-chlorid. 1 ml roztoku obsahuje 37 mg mořské soli a 0,1 mg benzalkonium-chloridu.

**Podmínky uchování:** Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**Doba použitelnosti:** 3 roky od data výroby

**Velikost balení:** papírová krabička se sprejem o objemu 50 ml (obsahuje přibližně 450 dávek)

 MEDOCHEMIE Ltd.,  
1-10 Constantinoupoleos Street,  
3011 Limassol, Kypr

**Poslední revize návodu k použití:**  
2016/10

