



DELMAR® Fresh nosní sprej s eukalyptem

Zdravotnický prostředek Návod k použití

DELMAR Fresh nosní sprej je izotonický roztok mořské vody obohacený o eukalyptovou silici. Je určen pro nosní sliznici s poruchou fyziologické funkce a pro každodenní hygienu nosních dutin. Roztok obsažený v nosním spreji obnovuje přirozenou vlhkost sliznice, podporuje její samočisticí schopnost a tvorbu ochranné povrchové vrstvy. Roztok obsahuje eukalyptovou silici, která má antiseptický účinek, zmírňuje otok nosní sliznice a tím snižuje riziko infekce horních cest dýchacích. Roztok přirozeně a účinně pečuje o správnou činnost nosu.

Kdy použít DELMAR Fresh

- pro každodenní hygienu nosu
- pro pacienty s ucpaným nosem, nachlazením, rýmou alergického původu a pro pacienty se suchou a podrážděnou nosní sliznicí s poškozením fyziologických funkcí
- pro pacienty se zánětem vedlejších dutin nosních (sinusitidou)
- u osob se sklonem k vysychání nosní sliznice na cestách a v klimatizovaném prostředí

Jak používat DELMAR Fresh

Dospělí a děti od 6 let: aplikujte jednu až dvě dávky do každé nosní dírky 2–3krát denně podle potřeby.

Před použitím vyjměte ochranný kroužek a sundejte průhledný ochranný kryt trysky. Sprej při aplikaci držte ve svislé poloze tryskou nahoru. Několikrát stlačte dávkovací mechanismus směrem dolů, dokud nedojde k vystříknutí roztoku. Trysku spreje jemně zasuňte do nosní dírky a stiskněte dávkovací mechanismus. Přitom stále držte sprej ve svislé poloze a nezaklánějte hlavu. Během vstříku lehce vdechujte nosem. Po použití omyjte tryšku dostatečným množstvím vody a vraťte ochranný kryt a kroužek do původní polohy. Z hygienických důvodů má každý uživatel mít svůj vlastní sprej.

Další informace

U citlivých osob může dojít k alergické reakci, která je obvykle mírná a vymizí po přerušení používání. Nedoporučuje se během těhotenství a kojení.

Složení: mořská sůl, eukalyptová silice, polysorbát 20, dinatrium-edetát, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, benzalkonium-chlorid a čištěná voda. 1 ml roztoku obsahuje 9 mg mořské soli, 1,2 mg eukalyptové silice a 0,1 mg benzalkonium-chloridu.

Podmínky uchování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Velikost balení: sprej o objemu 50 ml (obsahuje přibližně 450 dávek)



MEDOCHEMIE Ltd.,
1-10 Constantinoupoleos Street,
3011 Limassol, Kypr

Poslední revize návodu k použití:
2018/03



www.delmar.cz



DELMAR® Fresh nosový sprej s eukalyptom

Zdravotnícka pomôcka Návod na použitie

DELMAR Fresh nosový sprej je izotonický roztok morskej vody obohatený o eukalyptovú silicu. Je určený pre nosovú sliznicu s poruchou fyziologickej funkcie a pre každodennú hygienu nosových dutín. Roztok obsiahnutý v nosovom spreji účinne obnovuje prirodzenú vlhkosť sliznice, podporuje jej samočistiacu schopnosť a tvorbu ochrannej povrchovej vrstvy. Roztok obsahuje eukalyptovú silicu, ktorá má antiseptický účinok, zmiernuje opuch nosovej sliznice a tým znižuje riziko infekcie horných dýchacích ciest. Roztok sa prirodzene a účinne stará o správnu činnosť nosa.

Kedy použiť DELMAR Fresh

- pri každodennej hygiene nosa
- pre pacientov s obštrukciou nosa, nachladnutím, nádchou alergického pôvodu a pre pacientov so suchou a podráždenou nosovou sliznicou s poruchou fyziologických funkcií
- pre pacientov so zápalom prínosových dutín (sinusitídou)
- pre osoby so sklonom k vysychaniu nosovej sliznice počas cestovania a v klimatizovanom prostredí

Ako používať DELMAR

Dospelí a deti od 6 rokov: aplikujte jednu až dve dávky do každej nosovej dierky 2 – 3krát denne podľa potreby.

Pred použitím vyberte ochranný krúžok a odoberte priehľadný ochranný kryt trysky. Sprej pri aplikácii držte vo zvislej polohe tryskou hore. Niekoľkokrát stlačte dávkovací mechanismus smerom dole, pokiaľ nedôjde k vystreknutiu roztoku. Trysku spreja jemne zasuňte do nosovej dierky a stisnite dávkovací mechanismus. Pritom stále držte sprej vo zvislej polohe a nezakláňajte hlavu. Počas streknutia ľahko vdychnite nosom. Po použití umyte tryšku dostatočným množstvom vody a vráťte ochranný kryt a krúžok do pôvodnej polohy. Z hygienických dôvodov má každý užívateľ mať svoj vlastný sprej.

Ďalšie informácie

U citlivých osôb môže dôjsť k alergickej reakcii, ktorá je zvyčajne mierna a vymizne po prerušení používania. Neodporúča sa počas tehotenstva a dojčenia.

Zloženie: morská soľ, eukalyptová silica, polysorbát 20, edetan disodný, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan sodný, benzalkóniumchlorid a čistená voda. 1 ml roztoku obsahuje 9 mg morskej soli, 1,2 mg eukalyptovej silice a 0,1 mg benzalkóniumchloridu.

Podmienky na uchovávanie: Uchovávať pri teplote do 25 °C. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby

Veľkosť balenia: sprej s objemom 50 ml (obsahuje približne 450 dávok)



MEDOCHEMIE Ltd.,
1-10 Constantinoupoleos Street,
3011 Limassol, Cyprus

Posledná revízia návodu na použitie:
2018/03

