



DELMAR® Panthenol nosní sprej

Zdravotnický prostředek Návod k použití

DELMAR Panthenol nosní sprej je izotonický roztok mořské vody obohacený o kalcium-pantothenát. Je určen pro nosní sliznice s poruchou fyziologické funkce a pro každodenní hygienu nosních dutin. Roztok obsažený v nosním spreji obnovuje přirozenou vlhkost nosní sliznice, podporuje její samočisticí schopnost a tvorbu ochranné povrchové vrstvy. Kalcium-pantothenát podporuje epitelizační procesy při hojení podrážděné a poškozené nosní sliznice. DELMAR Panthenol přirozeně a účinně pečuje o správnou činnost nosu, jeho pravidelné používání snižuje riziko infekce horních cest dýchacích.

Kdy použít DELMAR Panthenol

- pro každodenní hygienu nosu
- pro pacienty s ucpaným nosem, nachlazením, rýmou alergického původu a pro pacienty se suchou a podrážděnou nosní sliznicí s poškozením fyziologických funkcí
- u osob se sklonem k vysychání nosní sliznice v klimatizovaném a vytopeném prostředí
- před aplikací nosních kapek, neboť zvlhčení nosních dutin umožní lepší kontakt mezi nosní sliznicí a podaným lékem
- po použití nosních kapek, neboť zvlhčení nosních dutin umožní zlepšit epitelizační procesy poškozené nosní sliznice

Jak používat DELMAR Panthenol

Dospělí a děti (od 1 roku): Aplikujte jednu až dvě dávky do každé nosní dírky několikrát denně podle potřeby.

Děti (do 1 roku): aplikujte jednu dávku do každé nosní dírky několikrát denně podle potřeby.

Před použitím vyjměte ochranný kroužek a sundejte průhledný ochranný kryt trysky. Sprej při aplikaci držte ve svislé poloze tryskou nahoru. Několikrát stlačte dávkovací mechanismus směrem dolů, dokud nedojde

k vystříknutí roztoku. Trysku spreje jemně zasuňte do nosní dírky a stiskněte dávkovací mechanismus. Přitom stále držte sprej ve svislé poloze a nezaklánějte hlavu. Během vstříku lehce vdechujte nosem. Po použití omyjte trysku dostatečným množstvím vody a vraťte ochranný kryt a kroužek do původní polohy. Z hygienických důvodů má každý uživatel mít svůj vlastní sprej.

Další informace


U citlivých osob může dojít k alergické reakci, která je obvykle mírná a vymizí po přerušení používání. Nejsou k dispozici dostatečné údaje pro posouzení rizika použití přípravku DELMAR Panthenol během těhotenství a kojení. Doba užívání není omezena.

Složení: mořská sůl, kalcium-pantothenát, benzalkonium-chlorid a čišťená voda. 1 ml roztoku obsahuje 9 mg mořské soli, 20 mg kalcium-pantothenátu a 0,1 mg benzalkonium-chloridu.

Podmínky uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby

Velikost balení: papírová krabička se sprejem o objemu 50 ml (obsahuje přibližně 450 dávek)

 MEDOCHEMIE Ltd.,
1-10 Constantinoupoleos Street,
3011 Limassol, Kypr

Poslední revize návodu k použití:
2018/03

www.delmar.cz

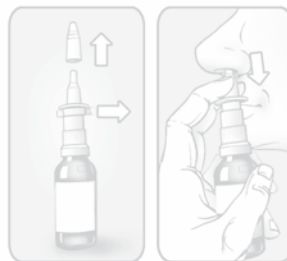

DELMAR® Panthenol nosový sprej

Zdravotnícka pomôčka Návod na použitie

DELMAR Panthenol nosový sprej je izotonický roztok morskej vody obohatený o kalcium-pantothenát. Je určený pre nosovú sliznicu s poruchou fyziologickej funkcie a pre každodennú hygienu nosových dutín. Roztok obsiahnutý v nosovom spreji účinne obnoví prirodzenú vlhkosť sliznice, podporí jej samočistiacu schopnosť a tvorbu ochrannej povrchovej vrstvy. Kalcium-pantothenát podporuje epitelizačné procesy pri hojení podráždenej a poškodenej nosovej sliznice. DELMAR Panthenol sa prirodzene a účinne stará o správnu činnosť nosa, jeho pravidelné používanie znižuje riziko infekcie horných dýchacích ciest.

Kedy použiť DELMAR Panthenol

- pri každodennej hygiene nosa
- pre pacientov s obštrukciou nosa, nachladnutím, nádchou alergického pôvodu a pre pacientov so suchou a podráždenou nosovou sliznicou s poruchou fyziologických funkcií
- pre osoby so sklonom k vysychaniu nosovej sliznice v klimatizovanom a suchom prostredí
- pred aplikáciou nosových kvapiek, pretože zvlhčenie nosových dutín umožní lepší kontakt medzi nosovou sliznicou a podaným liekom
- po použití nosových kvapiek, pretože zvlhčenie nosových dutín umožní zlepšiť epitelizačné procesy poškodenej nosovej sliznice

Ako používať DELMAR Panthenol

Dospelí a deti: Aplikujte jednu až dve dávky do každej nosovej dierky niekoľkokrát denne podľa potreby.

Deti (do 1 roka): aplikujte jednu dávku do každej nosovej dierky niekoľkokrát denne podľa potreby.

Pred použitím vyberte ochranný krúžok a odoberte priehľadný ochranný kryt trysky. Sprej pri aplikácii držte vo zvislej polohe tryskou hore. Niekoľkokrát stlačte

dávkovací mechanismus smerom dole, pokiaľ nedôjde k vystreknutiu roztoku. Trysku spreja jemne zasuňte do nosovej dierky a stisnite dávkovací mechanismus. Pritom stále držte sprej vo zvislej polohe a nezaklňajte hlavu. Počas streknutia ľahko vdýchnite nosom. Po použití umyte trysku dostatočným množstvom vody a vráťte ochranný kryt a krúžok do pôvodnej polohy. Z hygienických dôvodov má každý užívateľ mať svoj vlastný sprej.

Ďalšie informácie


U citlivých osôb môže dôjsť k alergickej reakcii, ktorá je zvyčajne mierna a vymizne po prerušení používania. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje na posúdenie rizika použitia DELMARU Panthenol počas tehotenstva a dojčenia. Doba používania nie je obmedzená.

Zloženie: morská soľ, kalcium-pantothenát, benzalkóniumchlorid a čistená voda. 1 ml roztoku obsahuje 9 mg morskej soli, 20 mg kalcium-pantothenátu a 0,1 mg benzalkóniumchloridu.

Podmienky na uchovávanie: Uchovávejte pri teplote do 25 °C. Uchovávejte mimo dohľadu a dosahu detí.

Doba použitelnosti: 3 roky od dátumu výroby

Veľkosť balenia: papierová škatuľka so sprejom s objemom 50 ml (obsahuje približne 450 dávok)

 MEDOCHEMIE Ltd.,
1-10 Constantinoupoleos Street,
3011 Limassol, Cyprus

Posledná revízia návodu na použitie:
2018/03

