



DELMAR® Sensitive nosní sprej s Aloe Vera

Zdravotnický prostriedek Návod k použiti

DELMAR Sensitive nosní sprej je izotonický roztok mořské vody obohacený o extrakt z listů Aloe Vera. Je určen pro nosní sliznice s poruchou fyziologické funkce a pro každodenní hygienu nosních dutin. Roztok obsažený v nosním spreji obnovuje přirozenou vlhkost sliznice, podporuje její samočisticí schopnost a tvorbu ochranné povrchové vrstvy. Extrakt z listů Aloe Vera má protizánětlivý a imunitu stimulující účinek, potlačuje zduření nosní sliznice a napomáhá regeneraci podrážděné nosní sliznice během infekce nebo po ní. Roztok přirozeně a účinně pečuje o správnou činnost nosu.

Kdy použít DELMAR Sensitive

- pro každodenní hygienu nosu
- pro pacienty s ucpaným nosem, nachlazením, rýmou alergického původu
- pro pacienty se suchou a podrážděnou nosní sliznicí s poškozením fyziologických funkcí
- u osob se sklonem k vysychání nosní sliznice v klimatizovaném a vytopeném prostředí
- před aplikací nosních kapek, neboť zvlhčení nosních dutin umožní lepší kontakt mezi nosní sliznicí a podaným lékem
- po použití nosních kapek, neboť zvlhčení nosních dutin umožní zlepšit epitelizační procesy poškozené nosní sliznice

Jak používat DELMAR Sensitive

Dospělí a děti od 1 roku: aplikujte jednu až dvě dávky do každé nosní dírky několikrát denně podle potřeby.

Děti do 1 roku: aplikujte jednu dávku do každé nosní dírky několikrát denně podle potřeby

Před použitím vyjměte ochranný kroužek a sundejte průhledný ochranný kryt trysky. Sprej při aplikaci držte ve svislé poloze tryskou nahoru. Několikrát stlačte dávkovací

mechanismus směrem dolů, dokud nedojde k vystříknutí roztoku. Trysku spreje jemně zasuňte do nosní dírky a stiskněte dávkovací mechanismus. Přitom stále držte sprej ve svislé poloze a nezaklánějte hlavu. Během vstříku lehce vdechujte nosem. Po použití omyjte trysku dostatečným množstvím vody a vraťte ochranný kryt a kroužek do původní polohy. Z hygienických důvodů má každý uživatel mít svůj vlastní sprej.

Další informace


U citlivých osob může dojít k alergické reakci, která je obvykle mírná a vymizí po přerušení používání.

Složení: mořská sůl, tekutý extrakt z listů Aloe Vera, benzalkonium-chlorid, čišťená voda. 1 ml roztoku obsahuje 9 mg mořské soli, 5 mg tekutého extraktu z listů Aloe Vera a 0,1 mg benzalkonium-chloridu.


Podmínky uchování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Velikost balení: sprej o objemu 50 ml (obsahuje přibližně 450 dávek)

 MEDOCHEMIE Ltd.,
1-10 Constantinoupoleos Street,
3011 Limassol, Kypr

Poslední revize návodu k použití:
2018/03

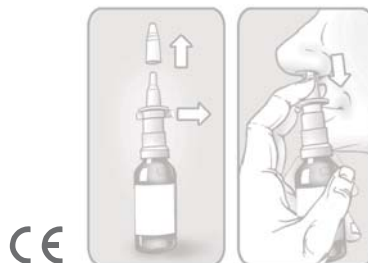

www.delmar.cz



DELMAR® Sensitive nosový sprej s Aloe Vera

Zdravotnícka pomôcka Návod na použitie

DELMAR Sensitive nosový sprej je izotonický roztok morskej vody obohatený o extrakt z listov Aloe Vera. Je určený pre nosovú sliznicu s poruchou fyziologickej funkcie a pre každodennú hygienu nosových dutín. Roztok obsiahnutý v nosovom spreji účinne obnovuje prirodzenú vlhkosť sliznice, podporuje jej samočistiacu schopnosť a tvorbu ochrannej povrchovej vrstvy. Extrakt z listov Aloe Vera má protizápalový a imunitu stimulujúci účinok, potláča zredenie nosovej sliznice a napomáha regenerácii podráždenej nosovej sliznice počas infekcie alebo po nej. Roztok sa prirodzene a účinne stará o správnu činnosť nosa.

Kedy použiť DELMAR Sensitive

- pri každodennej hygiene nosa
- pre pacientov s obštrukciou nosa, nachladnutím, nádchou alergického pôvodu
- pre pacientov so suchou a podráždenou nosovou sliznicou s poruchou fyziologických funkcií
- pre osoby so sklonom k vysychaniu nosovej sliznice v klimatizovanom a suchom prostredí
- pred aplikáciou nosových kvapiek, pretože zvlhčenie nosových dutín umožní lepší kontakt medzi nosovou sliznicou a podaným liekom
- po použití nosových kvapiek, lebo zvlhčenie nosových dutín umožní zlepšit epitelizačné procesy poškodenej nosovej sliznice

Ako používať DELMAR

Dospelí a deti od 1 roka: aplikujte jednu až dve dávky do každej nosovej dierky niekoľkokrát denne podľa potreby.

Deti od 1 roka: aplikujte jednu dávku do každej nosovej dierky niekoľkokrát denne podľa potreby.

Pred použitím vyberte ochranný krúžok a odoberte priehľadný ochranný kryt trysky. Sprej pri aplikácii držte vo zvislej

polohe tryskou hore. Niekoľkokrát stlačte dávkovací mechanizmus smerom dole, pokiaľ nedôjde k vystreknutiu roztoku. Trysku spreja jemne zasuňte do nosovej dierky a stisnite dávkovací mechanizmus. Pritom stále držte sprej vo zvislej polohe a nezakláňajte hlavu. Počas streknutia ľahko vdýchnite nosom. Po použití umyte trysku dostatočným množstvom vody a vraťte ochranný kryt a krúžok do pôvodnej polohy. Z hygienických dôvodov má každý užívateľ mať svoj vlastný sprej.

Ďalšie informácie


U citlivých osôb môže dôjsť k alergickej reakcii, ktorá je zvyčajne mierna a vymizne po prerušení používania.

Zloženie: morská soľ, tekutý extrakt z listov Aloe Vera, benzalkóniumchlorid, čistená voda. 1 ml roztoku obsahuje 9 mg morskej soli, 5 mg tekutého extraktu z listov Aloe Vera a 0,1 mg benzalkóniumchloridu.

Podmienky na uchovávanie: Uchovávať pri teplote do 25 °C. Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Doba použitelnosti: 2 roky od dátumu výroby

Vel'kosť balenia: sprej s objemom 50 ml (obsahuje približne 450 dávok)

 MEDOCHEMIE Ltd.,
1-10 Constantinoupoleos Street,
3011 Limassol, Cyprus

Posledná revízia návodu na použitie:
2018/03

